

Návod k použití čisticí sady Cedis®


Čištění

- 1) Rozpojte hadičku od háku sluchadla.
- 2) Vložte tabletu do 150 ml vody.
- 3) Do vzniklého roztoku ponořte koncovku.
Doba působení min. 15 minut, max. 8 hodin.
- 4) Poté koncovku opláchněte pod tekoucí vodou.
- 5) Povrch vysušte měkkým hadříkem.
- 6) Hádličku profoukněte balónkem.
- 7) Spojte znovu hadičku se sluchadlem.

Doporučuje se čistit **2x týdně**.



Nikdy neponořujte sluchadlo do vody!
Nepoužívejte na zvukovodová sluchadla!
Nikdy tablety nekonzumujte a roztok nepijte!

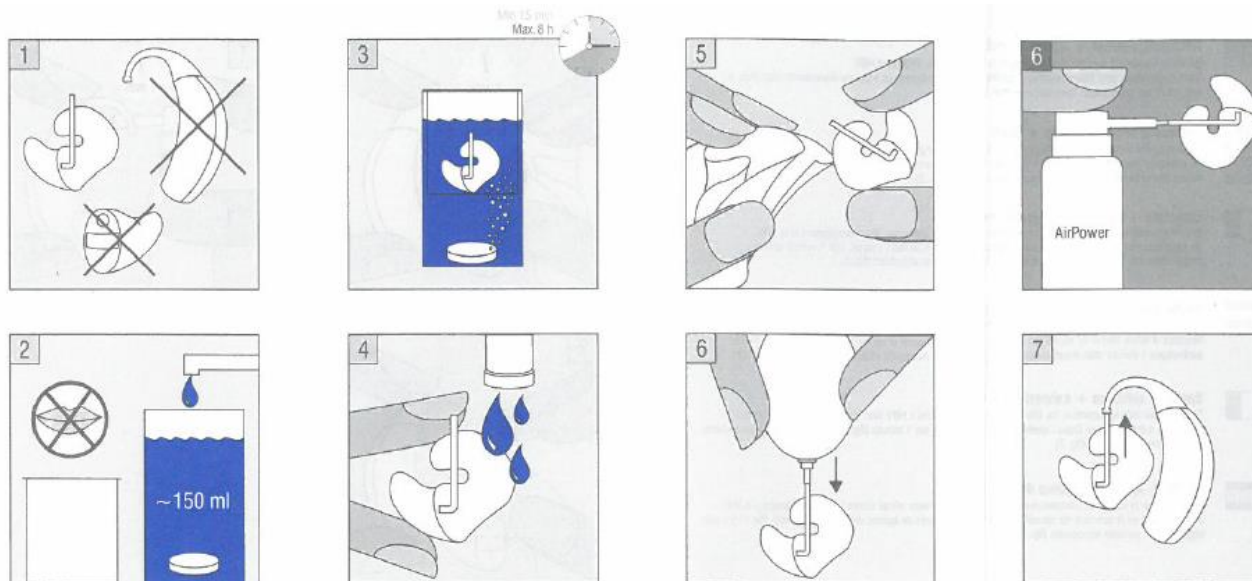

Vysoušení


- 1) Před vysoušením vyjměte baterii ze sluchadla.
- 2) Před prvním použitím vyndejte kulatou kapsli s krystaly z obalu a vložte na dno vysoušecí nádoby pod mřížku.
- 3) Na mřížku položte celé sluchadlo včetně koncovky.
Pečlivě zavřete a nechte působit 8 hodin (nejlépe přes noc).

Kapsle je opakovaně použitelná, dokud zlatožlutý indikátor nezmění barvu na bílou.

Doporučuje se používat **denně**.





Neotvírejte kapsli.
Obsah kapsle nikdy nekonzumujte!

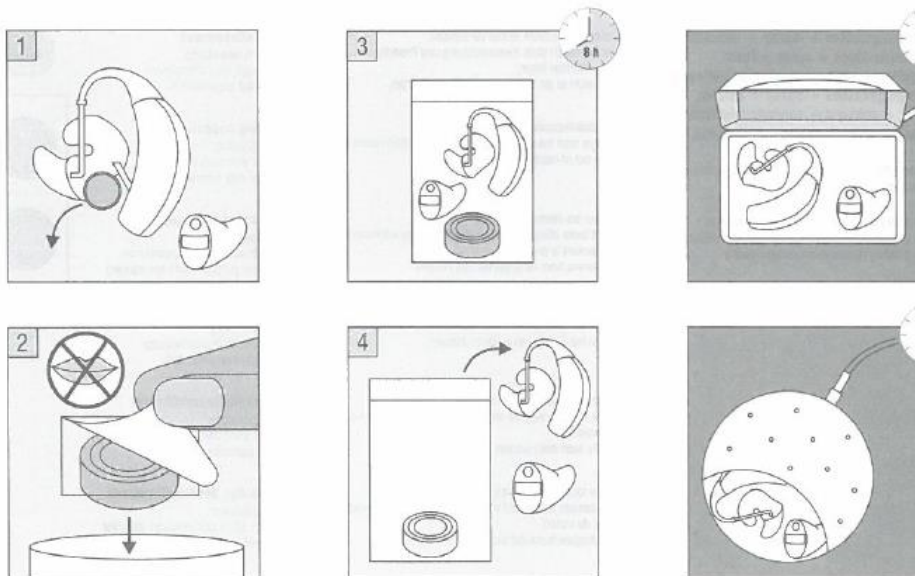

Čisticí ubrousky + sprej + pěna

Dezinfikují sluchadlo od bakterií, plísní, HBV a HIV virů.


- 1) Zvlhčete povrch celého sluchadla a pečlivě otírejte, nechte působit po dobu 1 minuty.
- 2) Poté pečlivě otřete celé sluchadlo měkkým navlhčeným hadříkem.

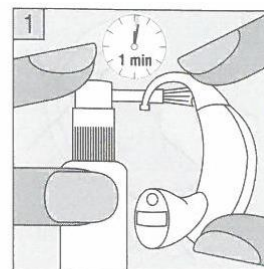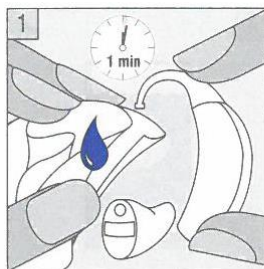

Doporučuje se používat **každý pátý den**.



Neaplikujte na otvory mikrofonu ani na přijímač!

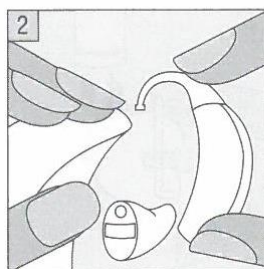

CE 0483

Složení (100 g):

Čisticí ubrousky + sprej + pěna:

- 0,25 g alkylbenzyltrimethylammoniumchloride
- 0,25 g alkylethylbenzyltrimethylammoniumchloride
- 0,25 g didecyltrimethylammoniumchloride

Vysoušecí kapsle:

silica s indikátorem (zcela neškodné)

Čisticí tablety:

potassium caroate, sodium bicarbonate, kyselina citronová, glukóza, ko-polymer VP/VA, sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfoacetate, aroma, CI 73015



Používejte dezinfekční prostředky bezpečně.

Vždy si přečtete návod k použití.

Uchovávejte mimo dosah dětí!


Některé typy čisticích sad neobsahují veškeré produkty uvedené v tomto návodu.

Výrobce:

egger Otoplastik+Labortechnik GmbH, Aybühlerweg 59, D-87439 Kempten, Německo

Dovozce:

REJA spol. s r. o., IBC, Příkop 843/4, 602 00 Brno, www.reja.cz, www.audiodum.cz

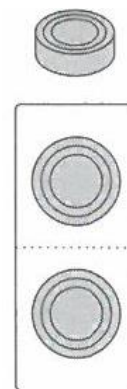

Cedis®