

Phonak RemoteMic set

Quick setup guide / Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide / Stručný návod k použití



PHONAK
life is on


Components
Komponenten
Composants
Komponenty




Phonak RemoteMic



Phonak ComPilot

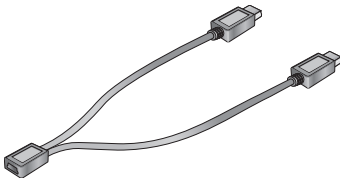


Charge
Aufladen
Charger
Nabíjení

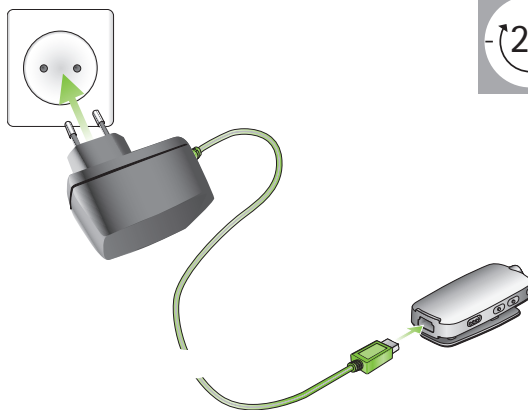

Or
Oder
Ou
Nabíjení

ComPilot

RemoteMic

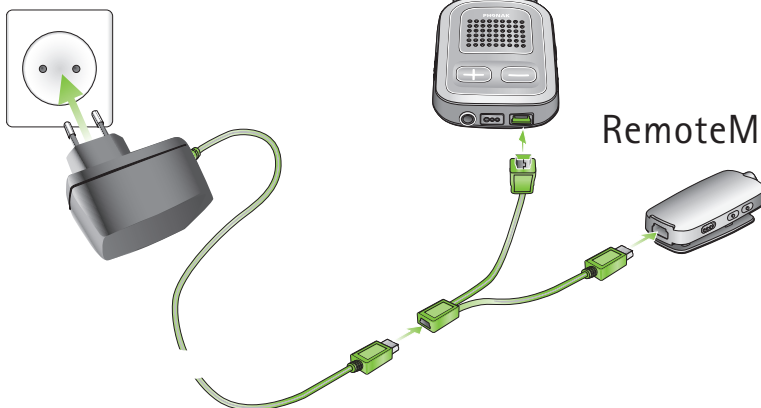

1



3



2

If you obtained RemoteMic/ComPilot as set, go to 3.

Direkt zu 3. wenn RemoteMic/ComPilot im Set gekauft wurde.

Si vous avez acheté le kit RemoteMic/ComPilot complet, allez directement au point 3.



Pokud máte sadu RemoteMic/ComPilot pokračujte krokem č. 3.

Pairing (1×)
Kopplung (1×)

Couplage (1×)
Párování


A

RemoteMic

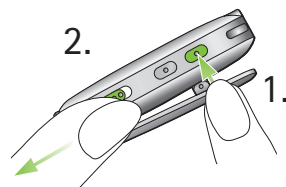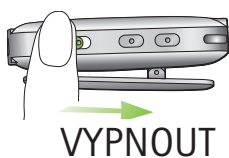


B


ComPilot

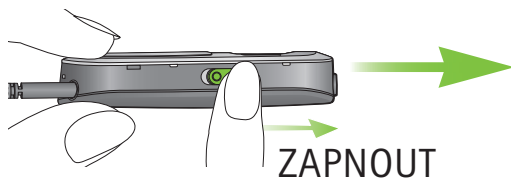


2 sekundy

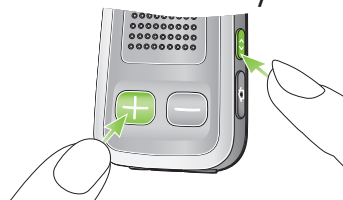

C

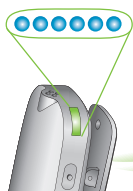

max. 1 min

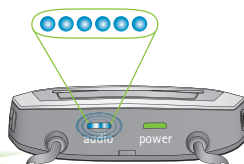


D



Solid blue
Konstant blau
Bleu continu

Indikátor svítí modře


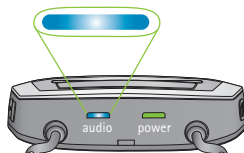


Wearing ComPilot

ComPilot tragen

Porter ComPilot

Zavěste si ComPilot na krk

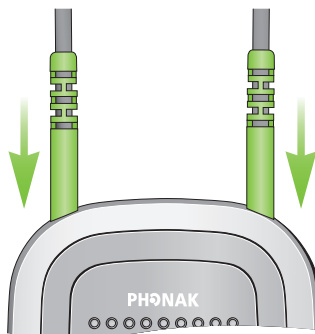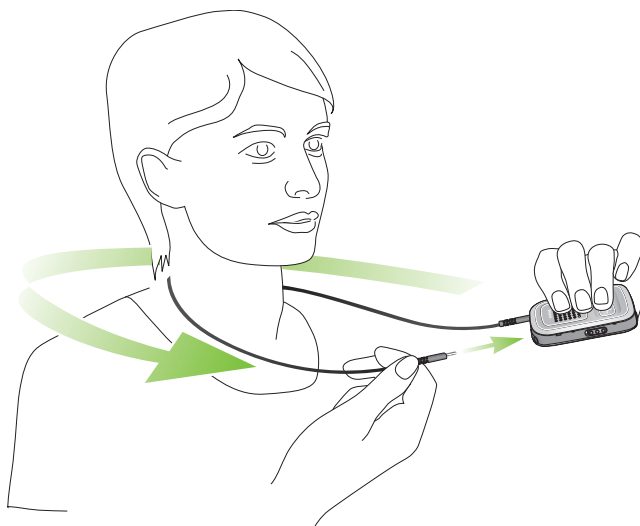


Wearing RemoteMic


RemoteMic tragen

Porter RemoteMic

Umístění RemoteMic

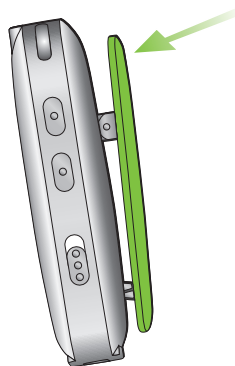

20 cm (8")


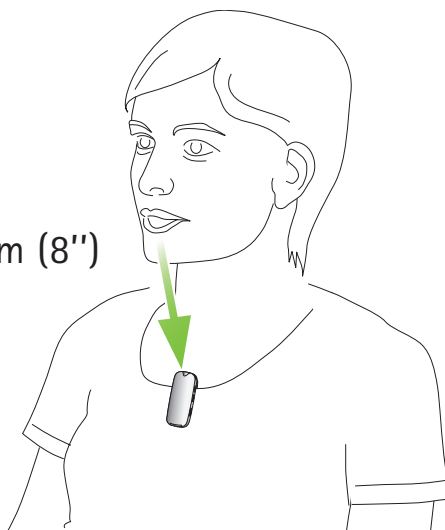


Switching on
Einschalten
Mise en marche
Zapnutí

RemoteMic

ComPilot

A

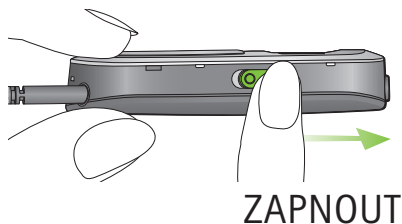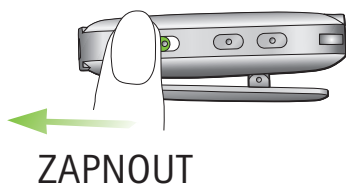


B




5-30 sekund



C

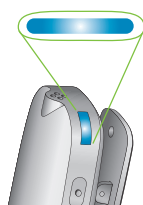


Solid blue
Konstant blau
Bleu continu
Indikátor svítí modře

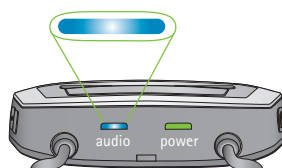



Usage
Benutzung
Utilisation
Používání

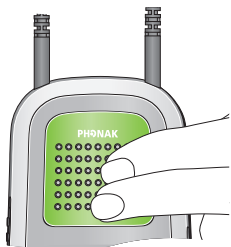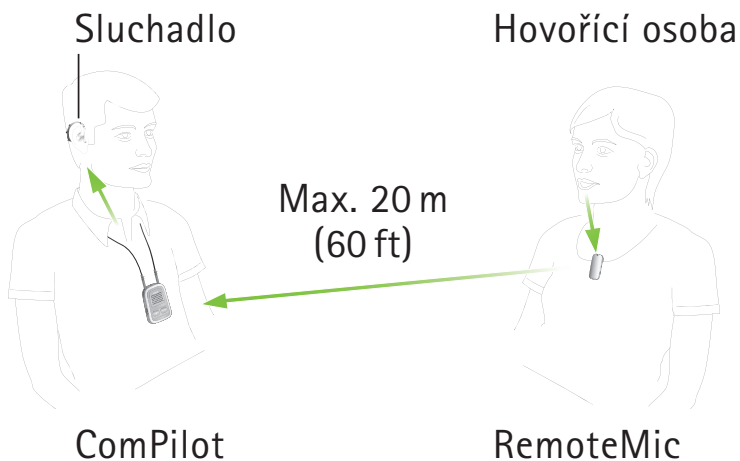

Pause / Resume
Pause / Fortsetzen
Pause / Continuer
Přerušení

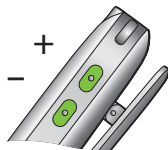

Volume setting
Lautstärke einstellen
Réglage du volume
Ovládání hlasitosti

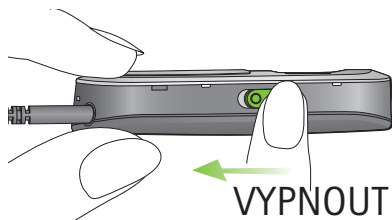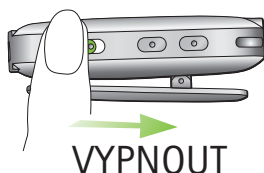

The Phonak RemoteMic user guide will give you detailed information about the setup.

Die Phonak RemoteMic Gebrauchsanweisung informiert detailliert über den Gebrauch.

Le mode d'emploi Phonak RemoteMic vous donnera des informations détaillées sur l'utilisation.

Detailní informace o zařízení Phonak RemoteMic naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Přehled světelné indikace



On
Ein
Marche
Zapnuto



Low battery
Niedriger Batteriestand
Accumulateur faible
Vybitá baterie



Audio transmission
Tonübertragung
Transmission audio
Přenos zvuku



Pause mode
Pause Modus
Pause
Přerušení



Pairing mode
Kopplungsmodus
Couplage
Párování

Servis a záruka

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

Tato záruka zahrnuje jakékoliv opravy způsobené vadami materiálu a/nebo zpracováním. Tato záruka nezahrnuje poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, vystavením působení chemických látek, ponořením do vody nebo nepřiměřenou zátěží. Poškození způsobené okolnostmi jako např. pádem na zem, vypráním, rozšlápnutím, rozkousáním od zvířete, vysoušením v mikrovlnné troubě apod. není předmětem poskytnuté záruky. Poškození způsobené zásahem neoprávněných servisních center nebo jiných neoprávněných osob do přístroje činí záruku na výrobek značky Phonak neplatnou. Tato záruka nezahrnuje žádné služby provedené poskytovatelem sluchadel v jeho provozovně.

Záruční list musí být řádně a čitelně vyplněn včetně data zakoupení, podpisu a razítka výdejny.

Tato záruka se vztahuje na výrobky značky Phonak uvedené níže:

Sériové číslo zařízení:

Datum zakoupení:

Podpis a razítko prodejce:

Dovozce

REJA spol. s r. o.

Sídlo:

Dolní náměstí 305/21

746 01 Opava

IČ: 44738706



zapsána v registru obchodního rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 2714

Centrální místo pro záruční a pozáruční servis:

REJA spol. s r. o., IBC, Příkop 843/4, 602 00 Brno,

tel.: 463 034 343, 734 495 208

web: www.reja.cz

e-mail: helpdesk.phonak@reja.cz, servis.phonak@reja.cz

Kontaktní a servisní formuláře:

www.komunikacnisystem.cz

www.sluchadla-deti.cz

Doplňky pro sluchadla:

baterie, čisticí prostředky, dálková ovládání, bezdrátová
příslušenství pro FM komunikaci a jiné

www.audiodum.cz

© Kopírování části a/nebo celé této příručky je možné
pouze se souhlasem společnosti REJA spol. s r. o.

Prohlášení o shodě

Společnost Phonak AG tímto prohlašuje, že tento výrobek společnosti Phonak vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních. Úplné znění prohlášení o shodě lze získat od výrobce.

Poznámky

[illegible]



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland



Dovozce pro ČR:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz

www.phonak.com

CE
0459

