


NÁVOD K POUŽITÍ OCHRANNÝ FILTR PROTI UŠNÍMU MAZU SmartGuard

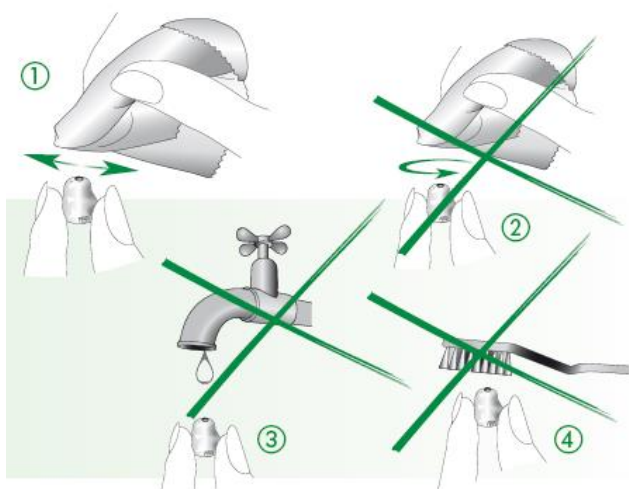


1. Údržba

Denně filtr otřete čistým měkkým hadříkem nebo ubrouskem přímým pohybem, nikdy ne rotačním.
Výměna filtru je nutná jednou za 2-3 měsíce.



3. Odstranění starého filtru

Aplikátor držte rovně a přímým směrem jej jemně zatlačte, dokud nezapadne do kroužku filtru, a vytáhněte jej.

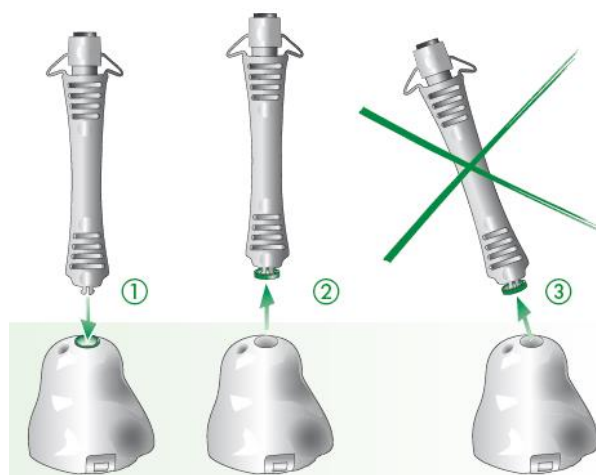

2. Aplikátor


Část určená k odstranění starého filtru



Část určená k aplikaci nového filtru

4. Aplikace nového filtru

Aplikátor držte rovně a přímým směrem jej jemně vtlačte dovnitř.

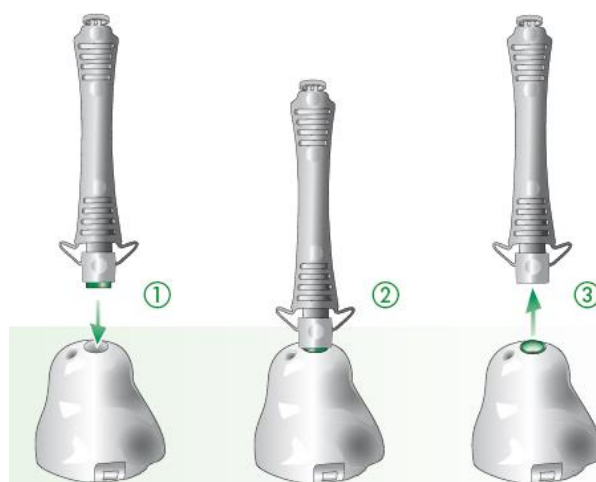

Výrobce: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Švýcarsko
Dovozce: REJA spol. s r. o., Dolní nám. 305/21, 746 01 Opava, www.audiodum.cz