


5

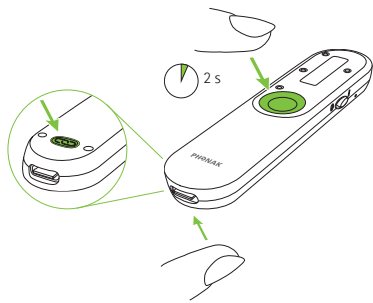


Press and hold the large center button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig die grosse mittlere Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez le grand bouton central et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Stiskněte a podržte velké prostřední tlačítko spolu s malým tlačítkem označeným ikonou řetízku na druhé straně dvě sekundy.

6

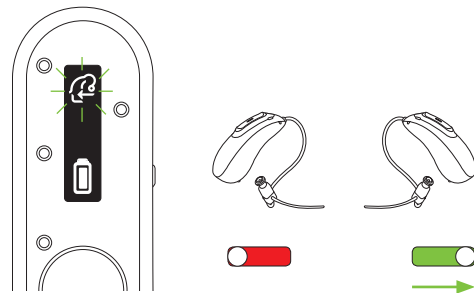


You should see a flashing hearing aid icon. Then switch on your right hearing aid and place it close to Roger On.

Sie sollten nun ein blinkendes Hörgerät-Symbol sehen. Schalten sie nun Ihr rechtes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger On.

Vous devriez voir une icône d'aide auditive clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive droite et placez-la à proximité de Roger On.

Měli byste vidět blikající ikonu sluchadla. Poté zapněte vaše pravé sluchadlo a umístěte ho co nejbliže k zařízení Roger On.

7

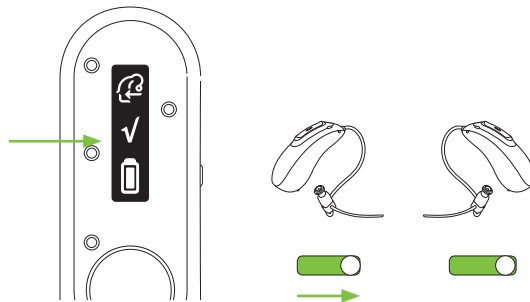

Wait a few seconds until you see a solid green LED. Then switch on your other hearing aid.

Warten Sie, bis Sie eine konstante grüne LED sehen. Schalten Sie Ihr anderes Hörgerät wieder ein.

En quelques secondes, vous voyez une LED verte fixe. Allumez votre autre aide auditive.

Počkejte pár sekund, dokud nevidíte svítit zeleně kontrolku LED. Poté zapněte vaše druhé sluchadlo.

Model: Roger On 3

Distributor pro Českou republiku:
REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
www.audiodum.cz



Sonova Communications AG
 Herrenschwandweg 4
 CH-3280 Murten
 Švýcarsko

www.phonak.com/roger

sonova
 HEAR THE WORLD



029-3371-45|V1.00|2025-01|na/5B © 2024 Sonova AG. Všechna práva vyhrazena.

PHONAK
 life is on

A Sonova brand


Roger™

RogerDirect™ Setup Guide for Roger On
 RogerDirect™ Verbindungsanleitung für Roger On
 Guide de connexion RogerDirect™ pour Roger On
 RogerDirect™ průvodce nastavením pro Roger On



roger

1

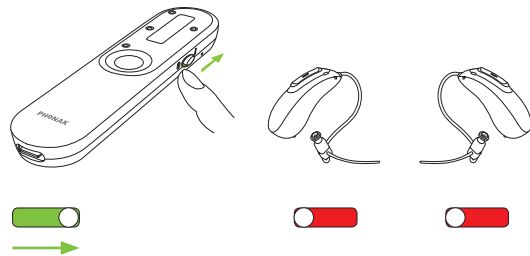


Switch on your Roger On.

Schalten Sie den Roger On ein.

Allumez votre Roger On.

Zapněte váš Roger On.

2

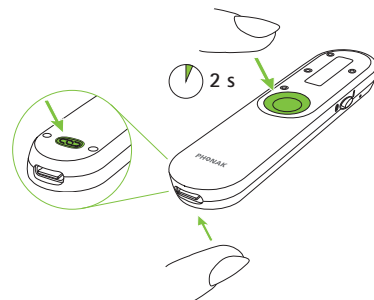


Press and hold the large center button and the small button with the chain icon on the backside for two seconds.

Halten Sie gleichzeitig die grosse mittlere Taste und die kleine Taste mit dem Kettensymbol auf der Rückseite zwei Sekunden lang gedrückt.

Appuyez et maintenez le grand bouton central et le petit bouton avec l'icône de la chaîne à l'arrière pendant deux secondes.

Stiskněte a držte velké prostřední tlačítko s malým tlačítkem označeným ikonou řetízku na zadní straně dvě sekundy.

3

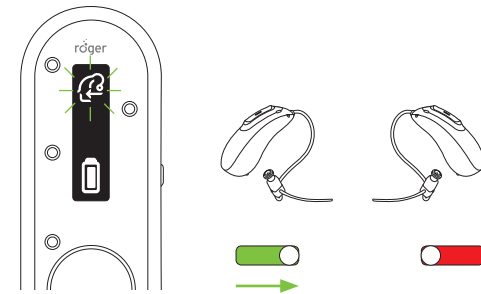


You should see a flashing hearing aid icon. Then switch on your left hearing aid and place it close to Roger On.

Sie sollten nun ein blinkendes Hörgerät-Symbol sehen. Schalten sie nun Ihr linkes Hörgerät ein und legen Sie es nahe Roger On.

Vous devriez voir une icône d'aide auditive clignotante. Allumez maintenant votre aide auditive gauche et placez-la à proximité de Roger On.

Měli byste vidět blikající ikonu sluchadla. Poté zapněte vaše levé sluchadlo a umístěte ho co nejbliže k zařízení Roger On.

4

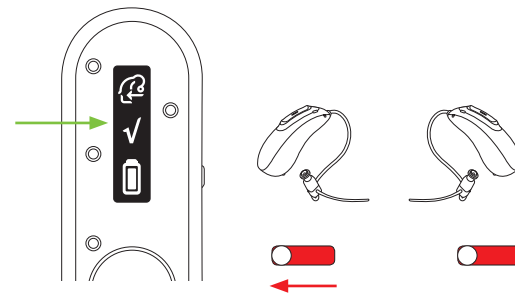

Wait until you see the check on the display. Then switch off your left hearing aid.

Warten Sie, bis Sie das Häkchen unterhalb des Hörgerätesymbols sehen. Schalten Sie Ihr linkes Hörgerät wieder aus.

En quelques secondes, vous voyez la coche sur l'écran. Eteignez votre aide auditive gauche.

Počkejte, dokud nevidíte symbol kontroly na displeji. Poté vypněte vaše levé sluchadlo.