

## Instrukce k používání

1. Rozsah dodaného zařízení.
2. Zapojte kabel do vstupu USB umístěném na straně zařízení. Zapojte ke zdroji napájení nebo do počítače. Ucítíte jemnou vibraci a uslyšíte zvukový signál. Nyní je zařízení připraveno k provozu.
3. Vyčistěte sluchadla/tvarovky nebo sluchátka vlhkým ubrouskem.
4. Vyjměte baterii ze sluchadel.
5. Otevřete víko zařízení a umístěte sluchadla/tvarovky nebo sluchátka do vysoušecí komory.



Aktivací dotykového tlačítka ucítíte jemnou vibraci a uslyšíte zvukový signál.

Světelné indikátory LED se rozsvítí.

Jakmile se víko zavře, zahájí se čisticí proces.

6. Čištění UV je dokončeno po 8 minutách.
7. Následně začne vysoušecí proces, který trvá 142 minut. Každých 30 minut zhasne jeden indikátor.
8. Jakmile jsou oba indikátory LED zhasnuté, vysoušecí proces je dokončen.
9. Vložte baterii zpět do sluchadel. Předtím než sluchadla/tvarovky nebo sluchátka použijete, nechte je několik minut vychladnout.
10. Pokud stisknete dotykové tlačítko na více než 3 sekundy v průběhu UV čištění/vysoušení, můžete zařízení předčasně vypnout.

## Charakteristika výkonu

Popis: Elektrická hygienická stanice

Model/Reference typu: SUDAC30

Zařazení:

- Třída II
- Odnímatelná jednotka zdroje napájení se vstupem:  
100 V – 240 V -; 50 Hz/60 Hz; 0,3 A
- Odnímatelná jednotka zdroje napájení s výstupem:  
5,0 V -; 1,0 A
- Zařízení: 5,0 V -; 3,5 W

Doba trvání procesů:

UV-C přibližně 8 minut

Teplo přibližně 142 minut

Velikost: 115 x 86 x 38 mm

### Upozornění:

- Zařízení může být používáno pouze s dodanou jednotkou zdroje napájení.
- Zařízení obsahuje dva UV zářiče typu 3 (UV-C).  
Nedívejte se do zdrojů UV záření.

Zařízení je určeno k použití výhradně v interiéru a pro domácí účely.

### Likvidace odpadů



Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že zařízení nesmíte odhodit do běžného domovního odpadu. Zařízení odevzdejte na sběrném místě určeném ke shromažďování elektronického odpadu. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví.

## Popis produktu zařízení e150.DUS

## Důležité informace



- 1 Světelný indikátor LED
- 2 Víko zařízení
- 3 Tlačítko s dotykovým a vibračním senzorem
- 4 Konektor pro mikro-USB
- 5 Hygienická komora pro čištění UV-C a vysoušení
- 6 Zdroje UV-C záření
- 7 Výběr kabelu sluchátek

### Pro Evropské země:

- Zařízení může být používáno dětmi od 8 let věku a staršími a osobami se sníženou fyzickou a kognitivní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo po obdržení pokynů k bezpečnému používání zařízení a porozumění souvisejících rizik.
- Zařízení nepatří do rukou dětem. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

### Pro ostatní země:

- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými kognitivními schopnostmi nebo nedostatkem znalostí a zkušeností s používáním, pokud neprobíhá pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, aby si s ním nehrály.
- UV záření může poškodit kryt sluchadel. Zařízení je určeno pouze pro UV-odolné poslechové systémy/ tvarovky a sluchátka.
- Dojde-li k jakékoliv závadě nebo poruše na zařízení, vypněte ho a vraťte prodejci.
- Nezasahujte do zařízení a používejte pouze dodaný adaptér pro napájení.
- Zařízení obsahuje dva UV zářiče typu 3 (UV-C). Nedívejte se do zdrojů UV záření.
- Během údržby a servisu by měly být UV zářiče zcela vypnuty ze zásuvky.

## Elektrická vysoušecí stanice e150.DUS

